

AKKUTESTGERÄT FÜR HANDBEDIENTEIL BELLAVITA BEDIENUNGSANLEITUNG

Funktionsweise

WICHTIG: Das Handbedienteil muss vor der Prüfung voll aufgeladen sein!

WICHTIG: Von SN 7D1803622499 bis 7D1806634367 kann das Prüfgerät nicht verwendet werden.

Sobald der Tester über die Handsteuerung mit Spannung versorgt wird, startet das Testprogramm.

1. Handsteuerung mit dem Testgerät verbinden, der Stecker muss spürbar einrasten. (Abb. 1)
2. Handbedienteil mit grüner Taste einschalten. (Abb. 2)
3. Die gelbe Auftaste betätigen und für zehn Sekunden gedrückt halten. (Abb. 3)

Ab SN 7D1806634368 muss bei Punkt drei die grüne und gelbe Taste gleichzeitig gedrückt werden, während die LED Orange blinkt kann die grüne Taste wieder losgelassen werden.

Das Display wird aktiv und zeigt die Leerlaufspannung des Akkus für 5 Sekunden an. Währenddessen blinkt die LED Orange am Tester. (Abb. 4)

Im Anschluss erlischt die LED für zwei Sekunden, in dieser Zeit wird der Akku mit einer simulierten Last belastet, das Display zeigt einen verringerten Wert an.

Je nach Zustand des Akkus leuchtet die LED dauerhaft wie folgt:

LED leuchtet Grün:	Akku OK
LED leuchtet Orange:	Akku schwach
LED leuchtet rot:	Akku leer oder defekt

4. Die gelbe Auftaste am Handbedienteil wieder loslassen, ansonsten wird der Akku erneut belastet.
5. Nach Beendigung der Prüfung das Handbedienteil mit der roten Taste wieder ausschalten. (Abb. 5)

Hinweis für Handbedienteile vor SN 7D1803622498:

Während die Leerlaufspannung am Testgerät angezeigt wird, blinkt am Handbedienteil die LED grün, während der Lastprüfung leuchtet diese nicht, danach blinkt sie wieder grün.

